

FRANTUMAPILLOLE

- 25872 FRANTUMAPILLOLE PROFESSIONALE SILENT KNIGHT
 - 25873 BUSTINE PER FRANTUMAPILLOLE - 1.000 bustine (20 conf. da 50)
- Professionale, silenzioso, consente di ridurre le pillole in polvere fine senza sforzo in pochi secondi. Le bustine evitano qualsiasi contaminazione ed eliminano il rischio di dispersione del farmaco. Silent Knight è fornito con 50 bustine.



- Fase 1:** inserire le pillole nella bustina. Sollevare la maniglia e disporre la bustina nell'apposito scomparto.
Fase 2: spingere la maniglia verso il basso per frantumare.
Fase 3: spingere la maniglia verso il basso per attivare il movimento di frantumazione. Ripetere più volte per ottenere una polvere finissima.
Fase 4: rimuovere la bustina.



TRITAPASTIGLIE ELETTRICO

- 25850 TRITAPASTIGLIE ELETTRICO SEVERO
- Tritapastiglie professionale silenzioso per tritare rapidamente ed efficacemente farmaci in ospedale, nelle case di cura o nelle strutture di assistenza domiciliare, evitando l'esposizione alla polvere o la contaminazione crociata. Funziona con cicli di triturazione autonomi che combinano compressione e rotazione, consentendo di tritare più pastiglie standard o rivestite a ogni ciclo. Inserito il farmaco nell'apposita coppetta da 30 ml, bastano 8 secondi (pillole normali) per polverizzarlo. Le pillole polverizzate sono ideali per i pazienti che hanno difficoltà a deglutire o per i farmaci che devono essere somministrati via flebo. Dotato di testata di triturazione in acciaio inox, 30 coppette, 30 fogli in cellophan, adattatore CA/CC e manuale GB, FR, IT, DE, NL disponibili su www.gimaitaly.com



DALLA PILLOLA ALLA POLVERE IN POCHI SECONDI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume coppetta:	30 ml
Durata ciclo triturazione:	8 secondi per piccole normali
Rumorosità:	52dB
Alimentazione:	batteria ricaricabile agli ioni di litio, 12V 3 Ah
Autonomia batteria:	500 triturazioni (tre giorni di triturazione continua)
Tempo di ricarica:	2 ore
Dimensioni - peso:	80x70x217 mm - 1,5 kg




- 25851 COPPETTE FARMACO SEVERO - conf. da 2100
 - 25852 COPERCHI COPPETTE SEVERO - conf. da 2000
 - 25853 FOGLI DI CELLOPHAN SEVERO - conf. da 2100
 - 25854 PIASTRA BASALE MAGNETICA SEVERO
- Piastra in metallo verniciata a polvere e autoadesivo magnetico da inserire sul fondo per stabilizzare Severo sui carrelli dei farmaci.

PORTAPILLOLE - WIRELESS

- 25871 PORTAPILLOLE WIRELESS
- Distributore automatico di pillole wireless per gestire e registrare i dosaggi delle pillole con App Healbox e server cloud. Consente ai pazienti e agli assistenti di programmare dosaggi fino a un massimo di 28 giorni consecutivi, cosicché la dose giusta sia somministrata al momento giusto a ciascun paziente. Fino a 9 allarmi acustici e visivi al giorno, che restano attivi per 30 minuti o fino all'apertura del portapillole. Ruota automaticamente al momento della dose successiva. 28 scomparti con capacità di 24 pillole delle dimensioni dell'aspirina. Il coperchio può essere chiuso con la chiave in metallo. Per ospedali, centri di cura o uso personale. Fornito con 1 vassoio per farmaci, 1 set di anelli dosatori, 1 chiave in metallo, 4 batterie AA e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alloggiamenti:	28 fessure	Bluetooth:	campo limitato 10 metri
Capacità:	24 pillole (grandezza Aspirina)	Alimentazione:	4 batterie AA
Materiale:	ABS	Dimensioni:	225x h 68 mm
Dim. display LED:	60x30 mm	Peso:	600 g

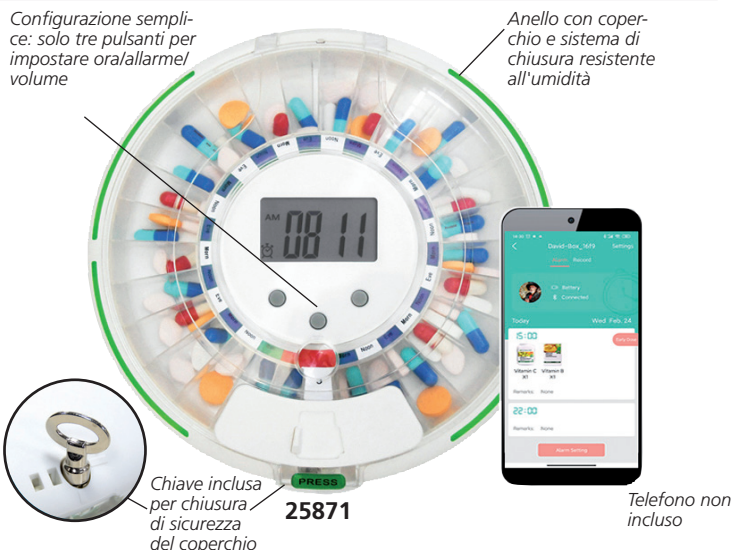

PINZE DA PRESA

- 28960 PINZA DA PRESA - 3 MODALITÀ - 66 cm
- Corpo in alluminio, manico in PP. Tre modalità di prensione: gancio in acciaio, punta magnetica, testa in gomma.

- 28963 PINZA DA PRESA - pieghevole
- Portata estesa per afferrare oggetti posizionati in luoghi difficilmente accessibili. Lunghezza 80 cm, pieghevole in 2. La linguetta di bloccaggio aiuta a trattenere l'oggetto.