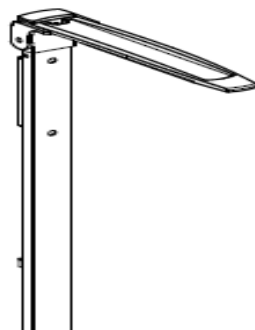




STATIMETRO TELESCOPICO A MURO WH200



1. AVVERTENZE	PAG. 1
2. SPECIFICHE TECNICHE	PAG. 2
3. INSTALLAZIONE A MURO CON SUPPORTI	PAG. 2
4. INSTALLAZIONE A MURO SENZA SUPPORTI	PAG. 3
5. ISTRUZIONI PER L'USO	PAG. 4
6. MANUTENZIONE E ASSISTENZA	PAG. 4

Grazie per aver acquistato lo statimetro telescopico misura altezza mod. WH200

Il prodotto è progettato per renderne l'utilizzo semplice e pratico e fornire una chiara indicazione della misura dell'altezza.

1. AVVERTENZE

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo del prodotto.

Il costruttore non è responsabile per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle seguenti istruzioni:

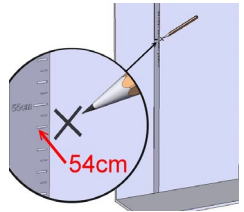
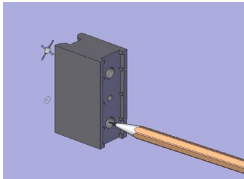
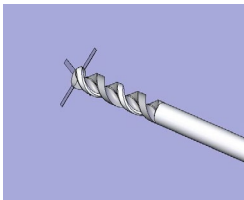
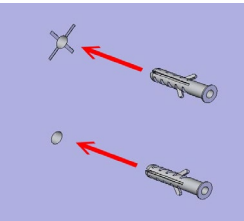
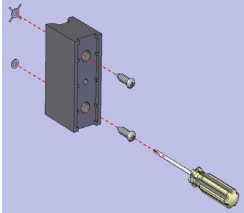
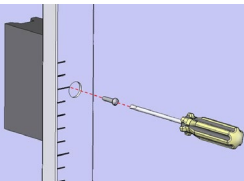
- Installare il dispositivo esclusivamente sulle bilance Wunder predisposte per tale funzione.
- Installare il dispositivo correttamente, pena la perdita della validità della garanzia.
- Per il montaggio utilizzare le minuterie fornite a corredo, verificando il corretto serraggio delle viti (riferirsi al capitolo assemblaggio).
- Utilizzare esclusivamente in luoghi chiusi, al riparo da agenti atmosferici.
- Utilizzare entro il range di temperatura consentito.
- Dopo ogni utilizzo ripiegare l'asta di misura al fine di scongiurare incidenti

2. SPECIFICHE TECNICHE

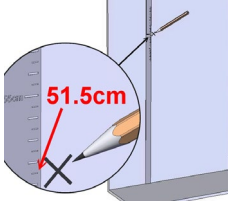
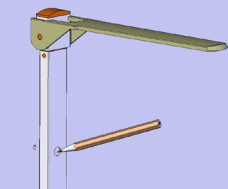
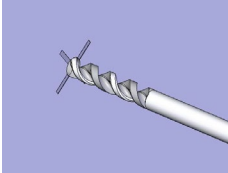
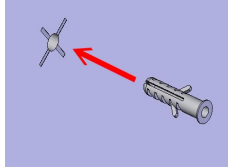
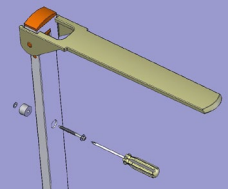
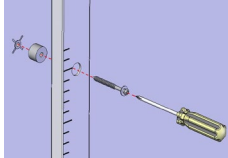
Range di misura	60 ~ 205 cm/ 24 - 80 3/4 inch
Divisione	1mm / 1/8 inch
Precisione	±10mm
Dimensioni	55 (W) x 784 (H) x 34 (D) mm
Peso	ca. 700 g
Temperatura utilizzo	da +10°C a +40°C
Prodotto medicale in accordo con la direttiva 93/42/EEC: Classe I	

3. INSTALLAZIONE A MURO CON SUPPORTI

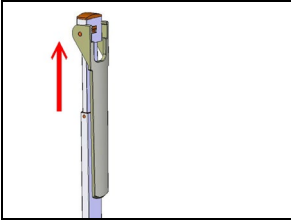
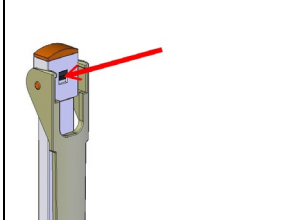
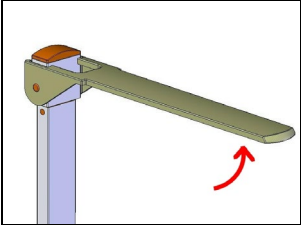
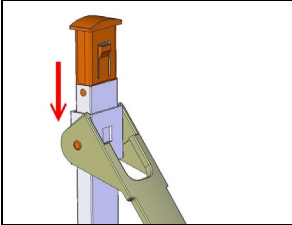
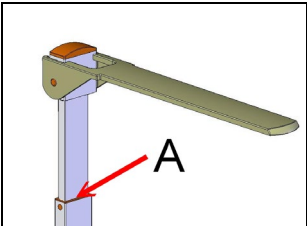
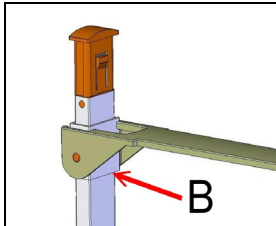
Dopo avere tolto dall'imballo lo strumento, verificare l'integrità e la presenza di tutti i componenti.

Disegnare sul muro una croce a 54 cm dal suolo.	
Allineare la croce al foro superiore del supporto nero e quindi marcare la posizione del foro inferiore.	
Eeguire i fori in corrispondenza dei due segni effettuati	
Inserire nei fori i tasselli plastici	
Avvitare il supporto al muro	
Avvitare l'asta dello statimetro al supporto (tramite il foro più in basso nella parte posteriore dello statimetro).	

4.INSTALLAZIONE A MURO SENZA SUPPORTI

<p>Disegnare sul muro una croce a 51.5cm dal suolo.</p>	
<p>Allineare la croce al foro inferiore presente sulla parte posteriore dello statimetro, quindi marcare la posizione del foro superiore.</p>	
<p>Eeguire i fori nel muro in corrispondenza dei due segni effettuati.</p>	
<p>Inserire nei fori i tasselli plastici</p>	
<p>Posizionare il distanziatore in gomma dietro allo statimetro, quindi avvitare partendo dal foro superiore</p>	
<p>Procedere quindi con il foro inferiore</p>	

5. ISTRUZIONI PER L'USO

Misure superiori a 131 cm		Misure inferiori a 130 cm	
1		1	
	Alzare la paletta poggia testa		Abbassare la paletta poggia testa e premere il fermo centrale nero
2		2	
	Posizionarla orizzontalmente		Tenendo premuto il fermo nero abbassare la paletta poggia testa
3		3	
	Abbassare l'asta fino al punto in cui la paletta tocca la testa del paziente. L'altezza può essere letta nel punto 'A'		Abbassare l'asta fino al punto in cui la paletta poggia testa tocca la testa del paziente. L'altezza può essere letta nel punto 'B'.

6. MANUTENZIONE E ASSISTENZA

La pulizia dello strumento va effettuata con un panno morbido, inumidito con soluzione a base alcolica. Durante la pulizia, evitare l'utilizzo di acqua, sostanze corrosive o sistemi di pulizia ad alta pressione. Durante il trasporto, prestare attenzione a non sottoporre lo strumento a urti o eccessive sollecitazioni meccaniche. In caso di riparazione o assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore.