

Presenta



Patent Application No. 2011250700

L'innovazione nell'evacuazione



Introduzione di AlbacMat™:

Situato nella stessa posizione per ogni letto, AlbacMat™ può essere utilizzato rapidamente per rimuovere i pazienti da una situazione di pericolo, a esempio in caso di incendio. L' AlbacMat™ è realizzato con una tavola di polipropilene personalizzato e in un materiale leggero di tela. La tavola di polipropilene permette all' AlbacMat™ di 'scivolare' sulle superfici (compresa la moquette), riducendo al minimo lo sforzo richiesto dai soccorritori per evacuare i pazienti. In casi estremi possono essere richieste due persone per tirare un paziente, tuttavia AlbacMat™ incoraggia una persona per paziente. Questo potenzialmente dimezza il tempo necessario per evacuare una struttura. La tavola di polipropilene funge da isolante per il paziente, assorbendo le vibrazioni del viaggio ed è anche resistente al calore fino a 85 gradi Celsius - rendendo sicuro l'utilizzo in condizioni di calore estremo.

Le seguenti istruzioni evidenziano il sistema di facile utilizzo necessario per evacuare rapidamente i pazienti.

1. Prendere AlbacMat™ dalla sua posizione di conservazione, assicurandosi che la linguetta del velcro™ sia rivolta verso di voi
2. Stare in piedi ai piedi del letto del paziente. Mantenere l'impugnatura; 'gettare' AlbacMat™ per srotolarlo accanto al letto (fare uno scatto con il polso).
3. Accertarsi che AlbacMat™ sia steso in piano e far rotolare il paziente su un fianco. Posizionare AlbacMat™ contro la schiena del paziente, dopo di che fatelo rotolare delicatamente all'indietro in modo che ora si trovi disteso su AlbacMat™. Fissare il paziente con le cinghie laterali.
4. Usando le cinghie all'estremità della testa, girare il paziente sul letto e abbassarlo a terra, quindi tirare il paziente fino al punto di assemblaggio di evacuazione designato.

Quando il soccorritore raggiunge la destinazione, può lasciare il paziente su AlbacMat™ e tornare per continuare il processo di evacuazione. Il paziente può essere curato come richiesto, o essere nuovamente spostato, mentre è ancora su AlbacMat™.

AlbacMat™ – per la vostra necessità di sicurezza

7 motivi per i quali avete bisogno di



Patent Application No 2011250700

1. Evacuazioni rapide - AlbacMat™ consente ai soccorritori di portare al sicuro i pazienti in modo rapido e sicuro sia per il paziente che per il soccorritore.
2. Requisiti OH&S - Con un uso corretto, AlbacMat™ non esercita alcuna pressione fisica sul soccorritore, consentendogli di effettuare evacuazioni multiple.
3. Multiuso - AlbacMat™ può essere utilizzato per spostare i pazienti su tutti i tipi di superfici, è ideale anche in piccole aree ed è riutilizzabile.
4. Uso istantaneo - Se ogni letto ha un AlbacMat™ non ci sono "tempi morti" o tempo sprecato in attesa dell'attrezzatura, per iniziare a evacuare i pazienti.
5. Soddisfare la politica di gestione del rischio di incendio - "Salvaguardare le persone da malattie o lesioni dovute a un incendio in un edificio" (DHS Capital Development Guideline September 01).
6. Facile da usare - Istruzioni chiare sono visibili a tutti gli utenti, e AlbacMat™ è semplice da usare e consente l'assistenza anche di personale non addestrato.
7. Salva la vita - Le evacuazioni semplici e sicure consentono ai soccorritori di portare in salvo i pazienti più rapidamente in situazioni in cui il tempo è il fattore critico.



SoFraPa
EMERGENCY TRAINING SPECIALIST