

HISTOFREEZER® CRIOTERAPIA PORTATILE

- **30591 HISTOFREEZER®** - kit con applicatore 2 mm
Due bombolette da 80 ml + 60 applicatori da 2 mm.
- **30592 HISTOFREEZER®** - kit con applicatore 5 mm
Due bombolette da 80 ml + 52 applicatori da 5 mm.
- **30589 HISTOFREEZER®** - kit grande con applicatori misti
Due bombolette da 80 ml, 24 applicatori da 2 mm, 36 applicatori da 5 mm.
- **30585 HISTOFREEZER®** - kit mini con applicatori misti
Una bomboletta da 80 ml, 16 applicatori da 2 mm, 16 applicatori da 5 mm.

Il sistema di criochirurgia portatile Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e molto efficace contro verruche e altre lesioni cutanee benigne. Questa terapia utilizza un metodo di congelamento localizzato per la distruzione controllata o la rimozione di tessuto vivo.

Adatto per adulti e bambini.

Scatola e manuale multilingue in: GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL. Disponibile su Internet: GR, PT, TH, Arabo. Solo per uso professionale.

Gli applicatori monouso da 2 mm rimangono freddi per 90 secondi.



30591

Gli applicatori monouso da 5 mm rimangono freddi per 120 secondi.



30592



30585



30589

9 tipi di lesioni benigne	% guarigione*
Verruca volgare	94%
Verruca plantare	86%
Mollusco contagioso	100%
Lentigo (macchie dell'età)	100% - facciale 99% - non facciale
Condilomi (verruche genitali)	89%
Cheratosi seborroica	95%
Fibroma pendulo	100%
Verruca piana	93%
Cheratosi attinica (facciale e non facciale)	91% - facciale 87% - non facciale

*Percentuali di guarigione per tipologia di lesione su un numero di test clinici ottenuti con histofreezer + post-trattamento di acido salicidico 27% / acido lattico 17%

2 mm 5 mm

Applicatori monouso da 2 mm per piccole lesioni
Applicatori monouso da 5 mm per grandi lesioni


CARICARE
Premere sulla valvola fino a quando cominciano a formarsi delle goccioline

CAPOVOLGERE
la bomboletta per 15 secondi per ottenere una temperatura di congelamento ottimale

APPLICARE
sulla lesione l'applicatore congelato per 15-40 secondi

CRYOMEGA® E CRYOCLEAR® DISPOSITIVI MULTIUSO DI CRIOCHIRURGIA

• **30586 CRYOMEGA®** con cartuccia 16 g - non ricaricabile
CryoOmega® distribuisce protossido di azoto liquido (-89°C), il criogeno portatile più freddo, ed è utilizzato per 16 lesioni comuni, tra cui verruche, fibromi penduli e cheratosi seborroiche. Strumento portatile di criochirurgia, ideale per studi medici, offre praticità e ottimi risultati con un solo trattamento. Fornisce un congelamento clinicamente efficace ed estremamente preciso. Dispositivo senza contatto (1 cm di distanza) utilizzabile su più pazienti. Fino a 300 secondi di trattamento per dispositivo (circa 30 trattamenti di 10 secondi). Per uso professionale.

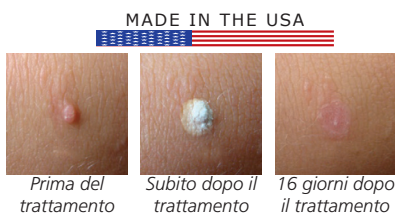

Tipo di lesione	Intervallo tempo congelamento (sec)*
Verruca volgare	10-20
Verruca plantare	10-20
Mollusco contagioso	3-10
Fibroma pendulo	5-10
Lentigo	2-5
Cheratosi attinica	5
Verruca piana	5-15
Cheratosi seborroica	5-10
Lesioni genitali	5-12

N₂O
-89°C

30586



CE 0543
FDA

Confezione e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, FI).

*Tempo di congelamento consigliato in letteratura
237

• **30587 CRYOCLEAR®** con cartuccia 16 g - non ricaricabile
CryoClear® utilizza anidride carbonica, che congela a -79°C a una profondità non superiore a 2 mm nella cute, trattando in modo sicuro e clinicamente efficace lesioni cutanee superficiali. L'efficacia superiore al 95%, combinata con una minore distruzione del tessuto sano, lo rende perfetto per trattare macchie dell'età, macchie dovute al sole e fibromi penduli. Offre una crioterapia eccellente e rapida, anche come trattamento combinato con esfoliazione chimica, trattamenti per il viso, microneedling o dermaplaining. Dispositivo senza contatto (0,5 cm di distanza) utilizzabile su più pazienti. Fino a 300 secondi di trattamento per dispositivo (circa 60 trattamenti di 5 secondi). Consigliato per saloni di bellezza e cosmesi.



Indicazione	Intervallo tempo congelamento (sec)*
Cheratosi attinica (macchie sole)	5-10
Lentigo (macchie dell'età)	5-10
Fibroma pendulo	5-10

*Tempo di congelamento consigliato in letteratura

CO₂
-79°C

30587



CE 0543
FDA

Confezione e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, FI).