

## SCHEDA TECNICA

<b>Nome Commerciale:</b>	Venostrip®
<b>Descrizione Prodotto:</b>	Set per safenectomia
<b>Divisione:</b>	Aesculap
<b>Prodotto da:</b>	AESFULAP AG - Tuttlingen
<b>Officina di produzione:</b>	B.Braun Melsungen AG
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	Ila
<b>Codice CND:</b>	C01901901

## **INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE**

Stripping della Safena Magna e S. Parva in caso di varici primarie non complicate o di insufficienza venosa cronica. Il set può essere usato sia per eso- sia per endo-stripping.

Conservare il prodotto a temperatura ambiente e non esporre a temperature elevate.

**TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI PER IL CONFEZIONAMENTO NON LIBERANO CLORO IN FASE DI INCENERIMENTO.**

Utilizzare il dispositivo subito dopo la sua rimozione dalla confezione interna sterile.

Attenersi alle istruzioni d'uso, Avvertenze e/o precauzioni riportate nella confezione.

## **INFORMAZIONI TECNICHE**

VENOSTRIP® è un set monouso per lo stripping della Vena Safena, secondo il Prof. Gruss. Il set è bidirezionale e può essere usato sia per eso- sia per endo-stripping.

VENOSTRIP® è composto da:

- un filo guida lungo 100 cm diametro 1,35 mm in acciaio ad effetto antimemoria ricoperto di copolimero di tetrafluoroetilene-esafuoropropilene (FEP), boccia terminale di aggancio olive diametro 3 mm
- una impugnatura
- tre olive intercambiabili da 9, 12, 15 mm. di diametro in poliossimetilene (POM)
- un raccordo a vite per il fissaggio delle tre olive.

E' inoltre disponibile anche solo il filo guida anch'esso confezionato singolarmente in scatole da 10 pezzi – cod. art. 5523176

## DATI TECNICI

<b>Monouso:</b>	Sì
<b>Sterile alla vendita:</b>	a confezione integra. Ossido Etilene
<b>Risterilizzabile:</b>	No
<b>Medodo di sterilizzazione:</b>	ETO
<b>Validità:</b>	5 anni dalla data di sterilizzazione; indicata su ogni singola busta
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	La confezione esterna è una scatola di cartoncino. La confezione interna è composta da: P involucro esterno: vassoio preformato di PE accoppiato con carta medicale, tipo peel-pack; P involucro interno: supporto di cartoncino medicale; P etichettatura: secondo le normative FU; All'interno di ogni confezione è inserito un foglietto illustrativo. L'unità di vendita è 10 pezzi.
<b>Temperatura di conservazione:</b>	Conservare il prodotto a temperatura ambiente e non esporre a temperature elevate
<b>Biocompatibilità</b>	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
<b>Anno inizio commercializzazione:</b>	1989.0

## LISTA CODICI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
5523176	filo guida per set Venostrip	C01901901	Ila	sca10	35333/R
5523184	Venostrip®	C01901901	Ila	sca10	395093/R